




DryShield®

SYSTÈME D'ASPIRATION TOUT-EN-UN AUTOCLAVABLE

- Économique : pièce **autoclavable 50 fois**
- **4 tailles** : Enfant, Small, Medium et Large
- Cale-bouche séparé pour un **confort optimal**
- Installation facile : **plug and play**
- Plus de **liberté** pour l'assistant(e)
- Durée de **traitement raccourcie**

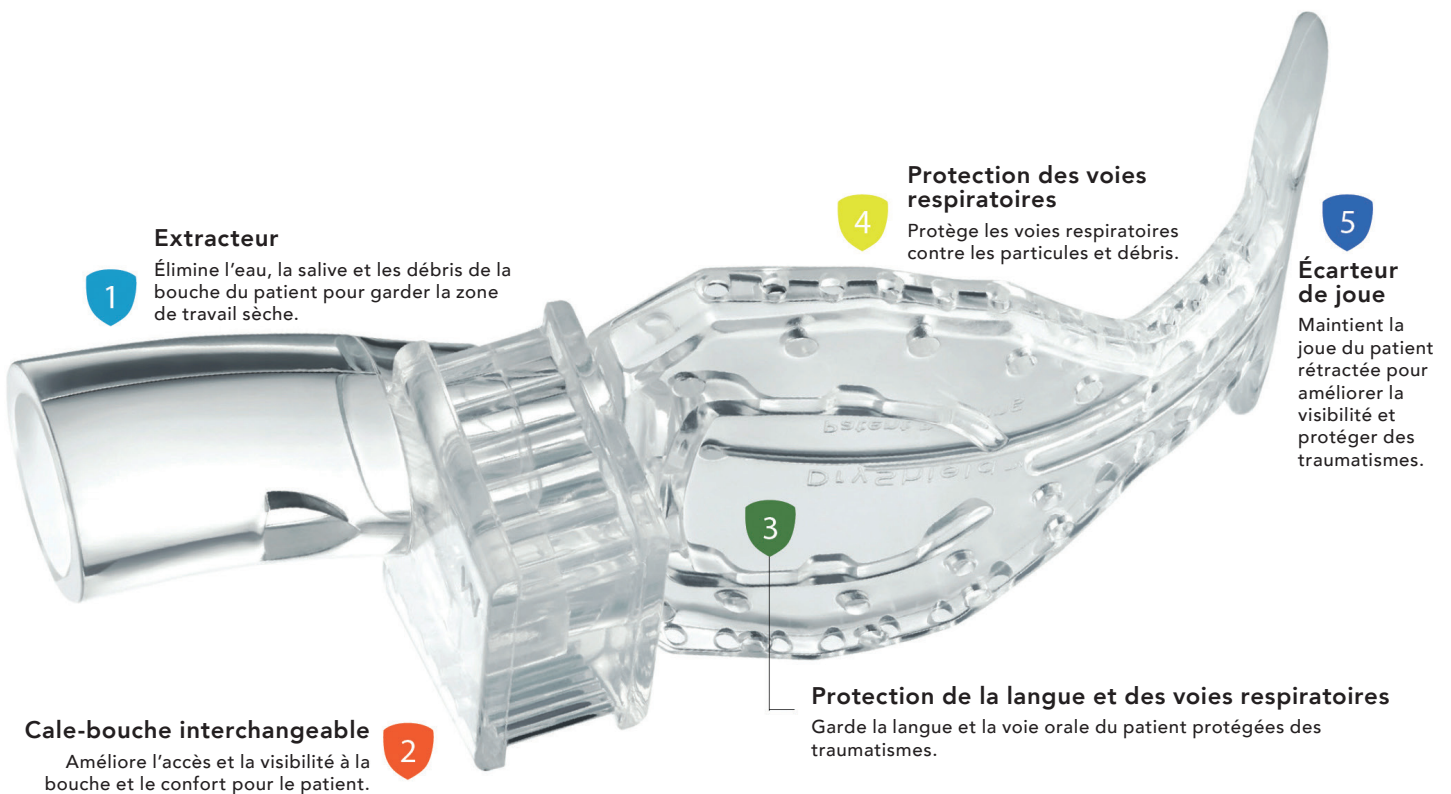

Le système **DryShield** est une application pratique apportant commodité et tranquillité pendant le traitement. Un système d'aspiration, un cale-bouche et un écarteur combinés dans un système pratique assurant une parfaite aspiration. Les accessoires sont complètement autoclavables et peuvent être utilisés **plus de 50 fois**. Disponible en 4 tailles (**Enfant, Small, Medium** et **Large**) pour que chaque patient ait une aspiration appropriée.




Installation



1 Pulvérisez de l'air et de l'eau à l'embouchure pour lubrifier.



2 Faites glisser l'embouchure sur la pièce à main avec un mouvement de bascule jusqu'à ce qu'il clique.

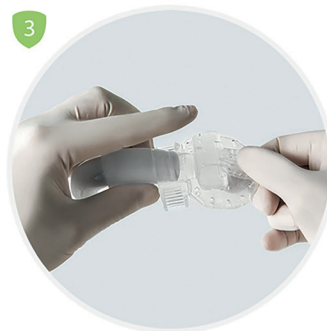

3 Pliez l'embout buccal sur lui-même.



4 Puis pliez les bords extérieurs de celui-ci vers l'intérieur.

Mise en place dans la bouche



1 Insérez lentement, le bord avant du cale-bouche aligné avec le bord distal de la canine.



2 Relâchez la pièce et laissez-la se positionner, en utilisant la pression des doigts pour l'adapter à la joue intérieure, molaires, palais et plancher buccal.



3 Placez le cale-bouche distal au niveau maxillaire des canines. Le patient repose sa mâchoire dessus.



4 Assurez-vous que l'embout est adapté à la bouche et remplacez les lèvres si besoin. Repositionnez le cale-bouche si vous souhaitez plus d'ouverture.

Instructions de stérilisation



1 Détachez le cale-bouche du rétracteur de joue.



2 Frottez avec une petite brosse en utilisant du savon et de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur. Rincez sous l'eau et enlevez les débris.



3 Placez l'embout buccal et le cale-bouche dans une solution à ultrasons pendant 15 minutes.



4 Rincez la solution à ultrasons sous l'eau courante puis séchez.



5 Placez le cale-bouche et l'embout buccal dans un sac autoclavable puis scellez.



6 Autoclavable à la vapeur à 134°C pendant au moins 20 mins, suivi d'un cycle de séchage de 30 minutes.

IMPORTÉ PAR :

 OPSYSE
3187, route d'Apt
84800 L'Isle sur la Sorgue

 04 42 04 32 68

 contact@opsyse.fr

VOTRE CONTACT :